


医学与工学的融合 中进康复产品

 **400-928-0858**

常州 江苏省常州市武进区菱香路33号
NO.33,Lingxiang Rd,
Wujin Economical Development Zone,
Changzhou,Jiangsu Province,China.
电话/ TEL: 400-928-0858
传真/ FAX: +86-519-85162516

泰州 江苏省泰州市海陵区九龙镇世纪大道88号
No.88,Centry Ave,
Jiulong Town,Hailing District,
Taizhou,Jiangsu Province,China

我们制造的不是产品，而是关爱！

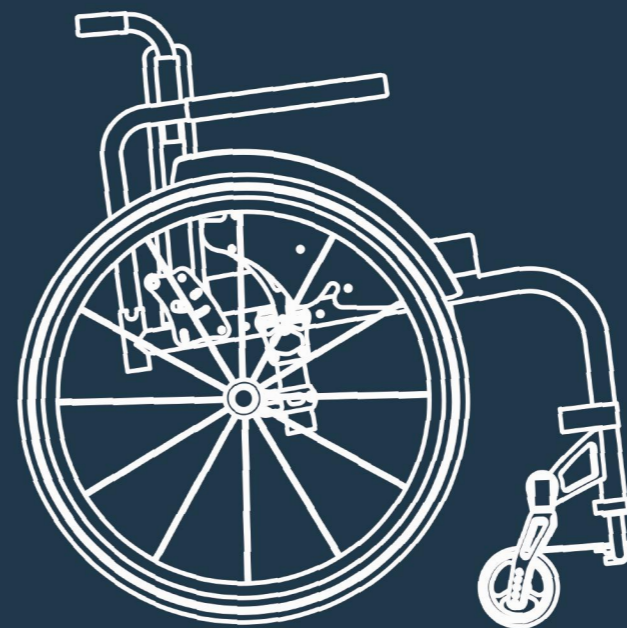

Jinmed

产品目录

PRODUCT CATALOG

Vol.21

www.zhjmedical.com



中进医疗常州工厂



中进医疗泰州工厂



加工课

焊接课

组装课

缝纫课

检验合格出货

仓库一角



中进医疗展厅

企业概要

常州中进医疗器材股份有限公司成立于2006年1月，自2012年起，一直是国家认定的高新技术企业，中进以研发、制造高端康复器材为主营业务，经过十多年的发展，已经成为世界顶级康复器材研发、制造企业，产品涵盖助行类、呼吸类医疗器材、智能纳米洗浴设备以及老年人、病人专用的乐浴系列产品、老年人及特殊人群的健身器材、救灾抢险产品；中进的产品多次被奥运会、世博会等政府及相关组织机构采购，目前中进产品遍布日本、美国、欧盟等100多个国家和地区。

中进医疗自成立以来，以技术创新作为企业发展的原动力，在拥有省级工程技术研究中心、省级工业技术中心等研发机构的基础上，与世界级的研发机构及企业在康复领域深度合作，成立海外研发中心，开发出如纳米洗浴设备等可以改变行业规则的全新产品，引领我国康复器材行业的发展方向，打造以我国康复器材领域为龙头的大健康产业生态链。

畅销全球



ISO13485 审查登记



CE 产品认证



JIS认证取得工厂



企业文化

以感恩和专业的精神来诠释

“我们制造的不是产品，而是关爱”

企业精神

积极的心态，坦率地沟通，

注重于细节，比别人努力

企业理念

提供舒适、方便、安全的康复产品，

让他们坚强的生命更加美丽、精彩

轮椅的使用方法

自走

行进方法

握住手扶圈的行进起始位置，肘关节角度约为120度。如右图，图中画圆圈的方法是最易于行进的。



※有座垫宽度和轮胎的大小·肘关节的可动范围等条件。




在外的注意点(倾斜道路上的行进方法)

在倾斜侧用力，轮椅不要往道路低的一侧转。一般的行进方法是向低的一侧转。

不同路面的行走方法

台阶

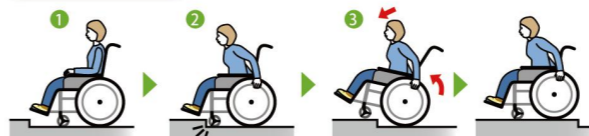

- 1 轮椅停在台阶前。
- 2 万向轮碰到台阶的直角。
- 3 身体前倾（臀部位置坐到最深），请用力划动手扶圈后前进。

※不能跨越落差大的台阶。

斜坡


在斜坡上坡时，用前倾的姿势向前行走。下坡时，同样用前倾的姿势，边刹车边转身向下。



上坡时向前 下坡时向后

沟槽和道口


经过比万向轮和驱动轮的宽度·直径都要宽的沟槽和道口时，请直角进入沟槽。不是直角时，万向轮和驱动轮有可能会嵌入沟槽内，难以取出。也可以在沟槽前抬起万向轮后通过的方法。

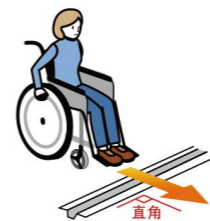

直角

网格


通过网格（填埋排水管的金属网等）时，请按右图所示一样，斜着通过网格。

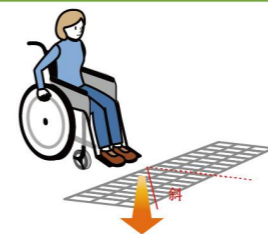

介护

推行方法

介护人员握住轮椅的把手，想行进方向推。突然出发·停止，会给乘坐者带来不快感。请提前招呼一声。

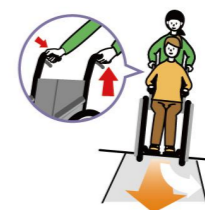

室外的注意事项(在倾斜道路上推行的方法)

倾斜侧的手需用力，推行时让轮椅不往低的方向转。一般的推行方法是往低的一侧转。

不同路面的行走方法


台阶



- 1 轮椅停在台阶前
- 2 拉把手的同时，踩斜躺控制杆，把万向轮往上抬。
- 3 主轮碰到台阶
- 4 请握住把手，抬起轮椅后跨越台阶。

斜坡

在斜坡上，一般是以前倾的姿势向前上坡，转身下坡。

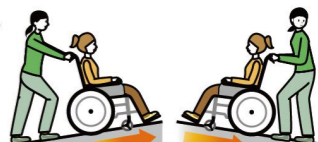

上坡时向前 下坡时向后

沟槽和道口


经过比万向轮和驱动轮的宽度·直径都要宽的沟槽和道口时，请直角进入沟槽。不是直角时，万向轮和驱动轮有可能会嵌入沟槽内，难以取出。也可以在沟槽前抬起万向轮后通过的方法。



直角

网格

通过网格（填埋排水管的金属网等）时，请按右图所示一样，斜着通过网格。

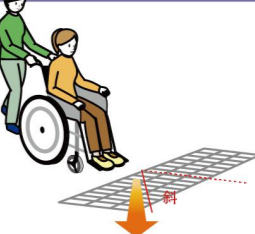

轮椅的主要种类

自走用轮椅	介护用轮椅	变换姿势型轮椅	功能性轮椅
乘坐者可自行操作的轮椅	由介护人员操作的轮椅	起立轮椅 座席升降轮椅 可躺轮椅等等	部件可以替换。 车轮和座背垫等位置可调。 部件组合方式，特性可变更。
			

选择轮椅的关键

选择轮椅之前

- 轮椅有很多种类
- 不是让人配合轮椅，而是要让轮椅配合人，请充分考虑。

Point 1 为了舒适地使用轮椅，需要注意的地方。

目的	环境	将来性
对乘车者来说，目的不明确的话会成为不称手的劣质轮椅。	室内·室外或在台阶·沟槽比较多的环境下使用时，通过考虑之后选择的轮椅会变得很称手。不适合环境的轮椅，会造成事故和受到伤害的危险。	建议不止是考虑现状，应该选择考虑到将来的轮椅。状态和体型会随着习惯和年龄·生活环境等因素而变化。

Point 2 请选择符合身体的轮椅。

身体寸法	座位能力
使用符合乘车者体型的轮椅，会容易划动，姿势不容易变形。另外，也可以预防侧弯和驼背，褥疮等的2次伤害。	没有支撑能否就坐，有支撑的话能否就坐，等问题需要考虑。姿势对于呼吸和动作等起着很重要的影响。

Point 3 再次考虑坐轮椅后的生活。

移乘方法	其他福祉用具和家具等环境的整合性
考虑怎样坐到轮椅上。推荐，安全的，长期的，不要给身体造成负担的移乘。	选择轮椅需要设定日常生活的场景，是否可以和玄关，卫生间，浴室，床，电梯同时使用。

轮椅各部位的名称



量尺寸的关键

Point 1 **选择轮椅要点**
考虑选择轮椅的关键项目后决定尺寸。

Point 2 除压方面，轮椅和乘坐者的接触面能够全部让体压分散。

Point 3 功能增加的话，重量也会增加。请结合优先顺序，来选择功能。

轮椅各部分测量方法

1 座垫的宽度




2 背支撑高



3 把手高度



4 座垫的进深

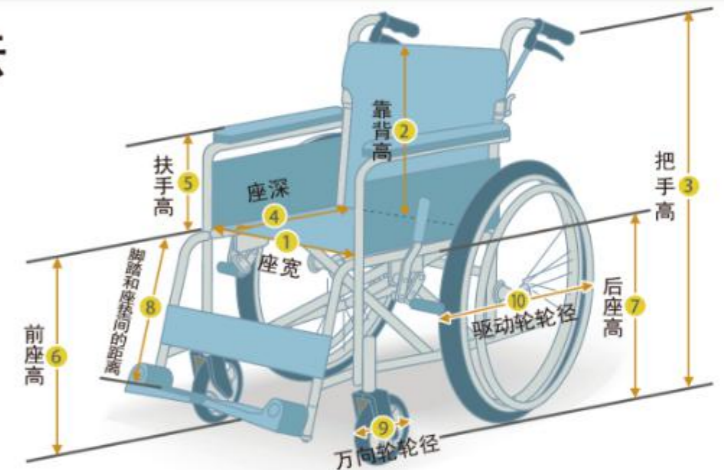

5 扶手的高度



6 前座高

自走时	按轮胎的大小和移乘方法来决定
介护时	按易于介护的高度来决定
室外用	脚踏反面和地面间隔5cm以上

7 后座高

结合前座高一起决定。
 安定 姿势稳定的状态，后座高=前座高-约2~3cm
 不安定 姿势不稳定的状态，后座高=前座高-约3~5cm
 *座面角太过的话，会发生驼背，移乘困难等的危险性。

8 脚踏·座垫间的距离



9 万向轮的轮径

大径	优点 容易跨越台阶。易于在草席等柔软的路面行走。 缺点 不利于转小圈。
小径	优点 易于转小圈。硬的路面上能够行走顺畅。 缺点 不利于在柔软的路面和台阶。

10 驱动轮(主轮)径

大径	优点 容易跨越台阶。易于在草席等柔软的路面行走。 缺点 不利于转小圈。轮椅的全长会增加。
小径	优点 易于转小圈。硬的路面上能够行走顺畅。轮椅的全长会减少。 缺点 不利于在柔软的路面和台阶。

目录

CONTENTS



01	公司简介 Brief Introduction	1-3
02	强劲之常规轮椅 Competitive series	9-12
03	雅致之功能轮椅 Standard series	13-16
04	飘羽之轻量轮椅 Ultralight series	17-22
05	梦幻之定制轮椅 Custom series	23-34

06	精灵之儿童轮椅 Kids series	35-42
07	动感之运动轮椅 Sports series	43-50
08	电动轮椅 Electric Wheelchair	51-60
09	呼吸类产品 Oxygen generator	61-66
10	助浴产品 Bath Product	67-72

劲系列

强劲之常规轮椅


NA-412	10
ZTA209	10
ZTA888E	11
ZTA188L	11
ZTA168	12
ZTA759	12

NA-412

承重100kg 介护型



独特的设计构造，可快速折叠，
收合体积小，仅9.5kg，外出旅游必备。
脚踏可上翻，移乘更方便。
加厚记忆海绵座垫，增强舒适感。

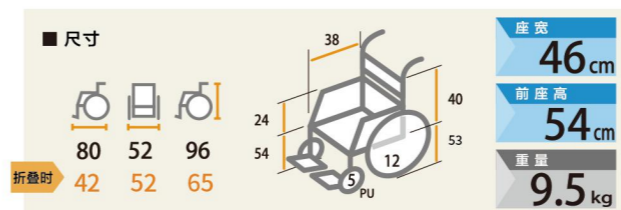

■ 扶手可上翻



■ 脚踏可上翻



■ 连动刹车



■ 脚踏驻车刹车




■ 大容量收纳网袋



■ 快拆旋钮实现一键折叠

ZTA209

承重100kg 介护型

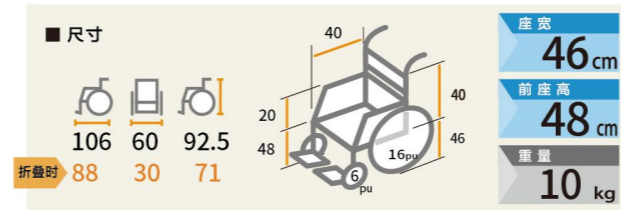

● 前后双刹车
出行更安全



● 窄型设计
整体宽度缩小




● 背部折叠把手
后倾10°



● 前后轮实心胎
减震耐磨

ZTA888E

承重100kg 自走型

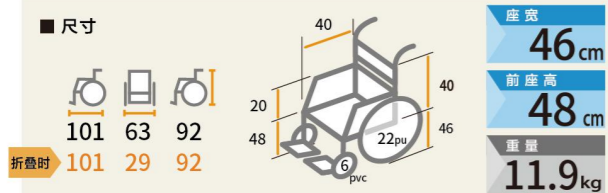

● 前后双刹车
出行更安全



● 窄型设计
整体宽度缩小





● 背部弯管
后倾设计



● 前后轮实心胎
减震耐磨

ZTA168

承重100kg 自走型

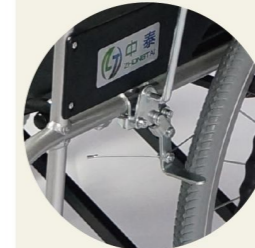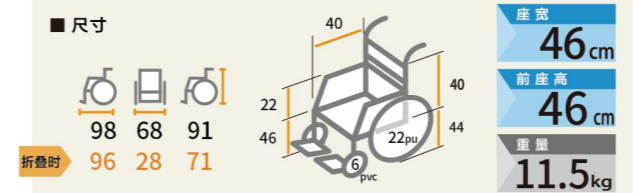


● 连动刹车



● 皮革海绵扶手




● 优质铝合金

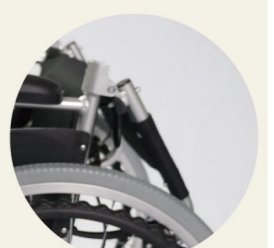


● 靠背可折叠

ZTA188L

承重100kg 自走型

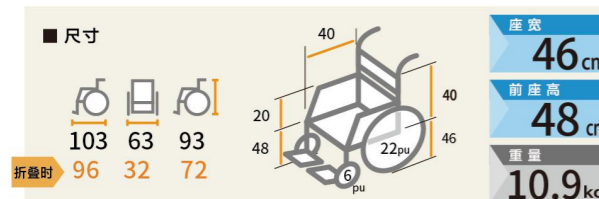

● 前后双刹车
出行更安全

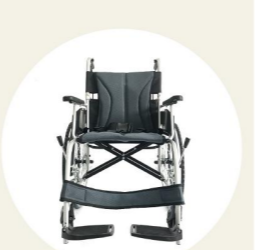

● 窄型设计
整体宽度缩小





● 背部弯管
后倾设计



● 前后轮实心胎
减震耐磨

ZTA759

承重100kg 介护型

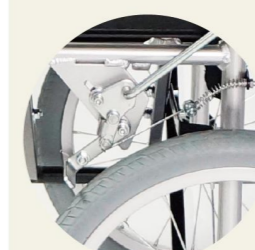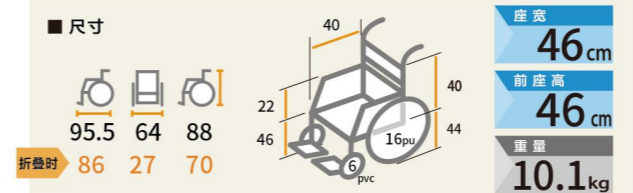


● 连动刹车



● 皮革海绵扶手



● 小轮设计, 轻巧便携

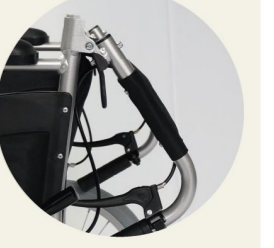

● 靠背可折叠

雅系列

雅致之功能轮椅


ZA-101(2017款)	14
ZA-209	15
NA-499	15
NA-118B	16

ZA-101



自走型 额定载重100kg

- ✓ 座面弯曲设计
- ✓ 腿部车架大R弯管工艺
- ✓ 升降式扶手
- ✓ 靠背可折叠
- ✓ 护裙板可拆卸
- ✓ 新型网眼布料

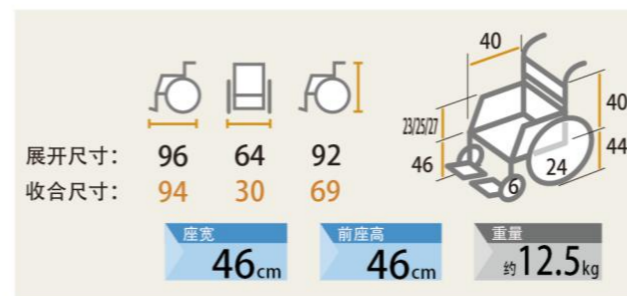

ZA-101(2017款) 主要特点



■ 座面弯曲设计

座面弯曲设计可防止身体前后移动。分散使用者臀部的压力。




■ 腿部车架采取大R弯管工艺

腿部车架在膝盖弯曲时可使稳定骨盆。



■ 升降式扶手 PP发泡扶手

扶手高度可调节，满足不同使用者需求。无毒无害，安全环保，适合皮肤接触。

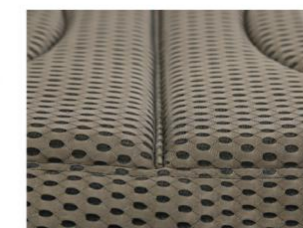

■ 覆盖式座背垫采用新型网眼布料

覆盖式座背垫方便清洗。新型网眼布料透气性极佳。



■ 护裙板采用自卡式设计

方便用户取下清理轮椅。



■ 靠背可折叠

收合体积小，不占空间，便于携带。



■ 双叉骨架加强稳定

采用航钛铝合金双叉骨架，加强稳定性。




■ 大容量储物袋

可放置日常物品。

ZA-209

轻便小巧
经典之作

介护型 额定载重100kg

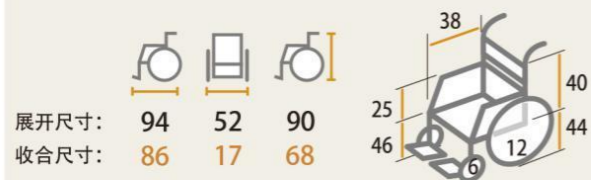

座宽 46cm 前座高 46cm 重量 9.0kg

● 座背垫可选颜色



收合体积小，不占空间，外出携带方便。
收合宽度仅17cm，是普通轮椅的一半。
采用针织护裙网，拆洗方便，可放置零碎物品。
采用连动自锁刹车，双倍安全。
覆盖式座背垫采用全新网眼布料。

NA-118B 可躺型

自走型 额定载重100kg

适用于中风、高位截瘫、年老体弱的人群，最大可达175°平躺，方便躺下休息。



座宽 46cm 前座高 52cm 重量 约20.3kg


● NA-118B可躺型 主要特点



■ 扶手可拆卸
扶手架拆卸后方便使用者侧移。



■ 腿部支撑可托起
16°~90°自由调节。

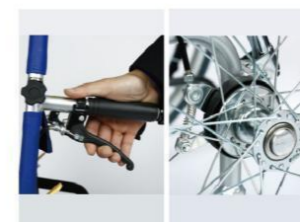

■ 采用双联刹把
单独握紧左刹把可控制靠背角度；单独握紧右刹把可使用双抱闸刹车。



■ 靠背可折叠
收合体积小，不占空间，便于携带。



■ 可躺式机构
整车最大可达到175°平躺。



■ 高靠背可拆卸
两种使用方式，根据使用者需求随意切换。



■ 采用高档皮革面料
柔软、透气、耐磨、强度高，具有高吸湿性和透水汽性的优点。



■ 标配防倾装置
安全稳固。

ZTA358L 载重型

额定载重150kg，扶手高度可调节，PPN肘节刹车操作更方便。

自走型 额定载重150kg



座宽 50cm 前座高 50cm 重量 约14.9kg

羽系列

飘羽之轻量轮椅

- NAH-207 18
- NA-413 19
- NA-457A 20
- NA-458A 20
- NA-457W 21

※产品技术或配置变化，恕不另行通知，谨以最新技术资料及检验结果为准。图片仅供参考，以实物为准。

NAH-207


轻量便携式轮椅



- 航空免托运
- 坐感舒适
- 安全可靠
- 超轻便捷



专用包
※飞机舱内使用请先联系航空公司

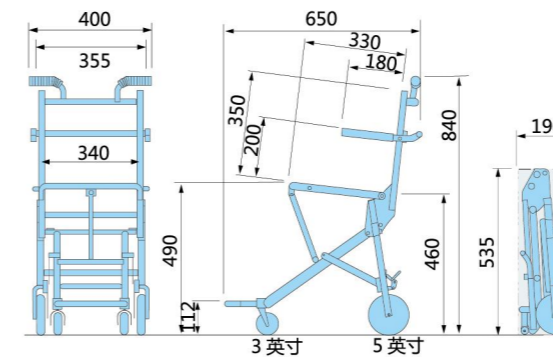

重量	约5.5 kg
座宽	36cm/ 40cm (可选)
展开尺寸 (L×W×H)	65cm×40cm×84cm
折叠尺寸 (L×W×H)	19cm×40cm×53.5cm
扶手高	20cm
靠背高	40cm
前座高	49cm
后座高	46cm
座深	33cm
额定载重	100kg

NAH-207 作品风格可选



VINCENT CHEN W

※产品技术或配置变化，恕不另行通知，谨以最新技术资料及检验结果为准。图片仅供参考，以实物为准。

自主研发ZK55航钛铝合金

轮椅的骨骼——航钛铝合金车架

用作卫星、航天飞机和导弹的骨架材料

材料名称	抗拉强度	屈服强度	密度
ZK55	≥400MPa	≥315MPa	2.81
7003	≥285MPa	≥245MPa	2.80
6063	≥215MPa	≥170MPa	2.71

新型高强度航钛铝合金ZK55，同等压力下，韧性强度较一般铝合金高出50%、较7003航钛铝合金高出25%，采用独特的焊接工艺，中进轮椅承重更好，更轻，更安全。

NA-413



介护型

额定载重100kg

靠背
大圆弧

超轻量
约9.9kg

U型一体
弯管工艺

一键
折叠



轻量系列

高强度车架

自走型 额定载重100kg

NA-458A



轻量
约10.9kg



介护型 额定载重100kg

NA-457A



轻量
约8.7kg



产品型号 NA-457A

介护型 额定载重100kg



产品型号 NA-458A

自走型 额定载重100kg



座背垫可选颜色



主要特点



超轻量、收合体积小
车架采用超高强度ZK55航钛铝合金



连动自锁刹车
连动刹车带自锁功能，双重保险。



靠背可折叠
收合不占空间，方便携带。



无极调节脚踏板
可在一定范围内任意调节角度和高度。



皮革海绵扶手
适合皮肤接触，增强舒适感。



PU万向轮
高性能避震万向轮。

轻量系列

高强度车架

NA-457AW

多功能介护型 额定载重100kg



轻量
约 10kg

高强度
车架



产品型号 NA-457AW

多功能介护型 额定载重100kg



座背垫可选颜色



主要特点



■ 扶手可开合
身体移动更方便。



■ 脚踏可开合
身体移动更方便。



■ 超轻量、收合体积小
车架采用超高强度ZK55航空钛铝合金



■ 连动自锁刹车
连动刹车带自锁功能，双重保险。



■ 靠背可折叠
收合不占空间，方便携带。



■ 无极调节脚踏板
可在一定范围内任意调节角度、高度。

Custom series

梦幻系列

梦幻之定制轮椅

NA-477F 23 - 28

NA-475F 23 - 28

NA-431 29

NA-432 29

NA-430 30

ASIII 31

MSIII 32

GENESIS 33

※产品技术或配置变化，恕不另行通知，谨以最新技术资料及检验结果为准。图片仅供参考，以实物为准。

采用3D调整式调节带
坐姿舒适的

座王

可以简单的调整3D背垫与人体背部相吻合。使用透气性良好的网眼面料可以支撑身体使其不错位



人的背部不是平面
但也不是简单的圆柱体
从前的调整式相比,可以短时间内调整好

可倾斜式

有自走型和介护型



标准款式


有自走型和介护型



肘部放置
不受拘束



靠背标准颜色

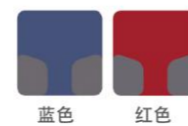


蓝色 红色

3步简单调节背部支撑

- 1 下部胸廓支撑带
 - 2 臀部支撑带
 - 3 胸廓支撑带
- 可用简单的方式对3种支撑带进行调整。

*调节时请参照使用说明书
*有关调节带的设定请向具备专业的工作人员询问

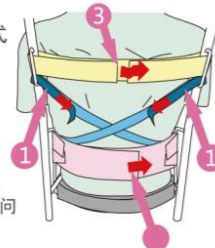

开合脱卸式脚踏



开合式扶手
(可选配开合升降式扶手)



座面高度调节式



可倾斜式	NA-475F	介护用			
	NA-477F	自走用			

座王系列除了NA-475F以外,全部都是座面高度可调式样。尽管NA-475F是可倾斜式样,但是前座高是40cm的低床设计。可以轻松放置小的餐桌。可以和大家一起开心的吃饭聊天,享受生活的乐趣。座王提供的是舒适的坐姿和有意义的时光。

对于烦恼多、驼背的人群




此处也很精致

座王背垫口袋可以完全放入A4大小的透明文件袋,是个很好的设计亮点。

座王的对应

加了臀部支撑、胸廓支撑的座王可以从腰椎下部开始支撑、支撑驼背侧弯。而且骶骨部位不接触座垫。

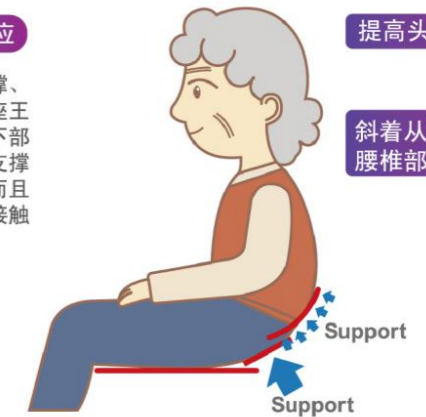

可选项

防倾装置

座王能够提供更舒适的高性能座垫



NA-475F 用插入式防倾装置, A 式样左右各一组

坐姿固定装置



向褥疮严重的客人推荐左图的座垫。其硅胶不受温度变化的影响,可以时常保持柔软。



NA-477F 及座王标准款用调节高度式防倾装置。A 式样左右各一组。可以对调整座面高度的装置。




虽是气垫,但无需调整气嘴。就坐后空气减少,适当的压力后气嘴会自动关闭。

厚度: 8cm
重量: 约0.7kg
(40*40尺寸的情况下)

自动开放式气嘴

座王分布图

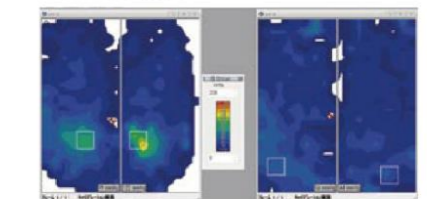

座王标准座垫


非标准座垫



使用高性能材料 EXGEL, 是款在体压分散方面优越的座垫

尺寸: 宽40cm*深40cm
重量约1.7kg
厚度: 前8.5cm/后7cm

座王分布图

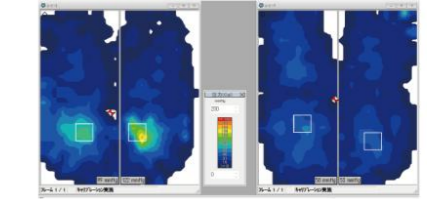

座王标准座垫

非标准座垫



真正的放松后心情才会变得平静下来。
将身体交给座王立刻就会感受到。
肩部不再受束缚，胸部打开的姿势。
即便深呼吸也会舒适。
前后左右身体不会转移，腹部也不受压迫。
那种被融合的舒适感觉，只有真正的使用后才会明白。



3D靠背可以很好的对应各种体型。
左右对称姿势、非对称姿势，任何
情况都能很好的适应。

臀部调节带可以很好的
包住骨盆进行支撑，
可以根据骨盆前倾直立，
驼背的状况进行调节。

调节带高度也是非常重要的



前倾的对应



直立的对应



驼背的对应

脚踏也非常重要




开合式脚踏




固定式脚踏

脚伸展后，骨盆的下方也会被拉伸至前方。
座王系列的脚踏、座背垫间的角度在设计时，
膝盖弯曲后也可以使骨盆保持稳定。

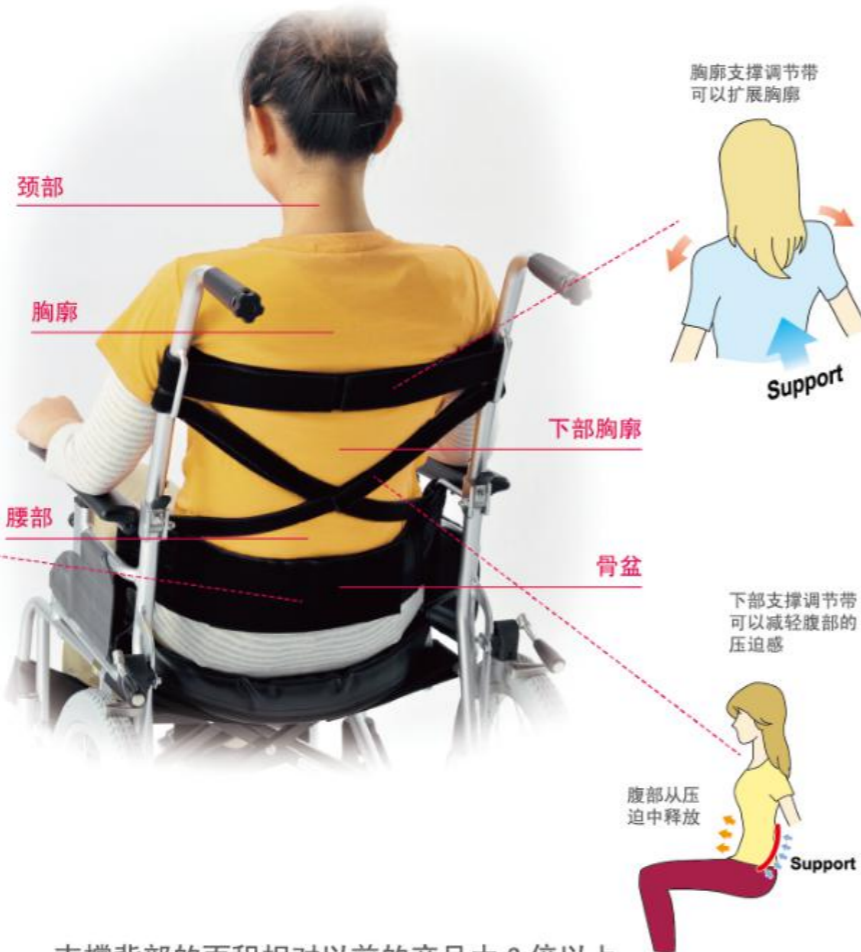

支撑背部的面积相对以前的产品大2倍以上
(和以前产品的对比)

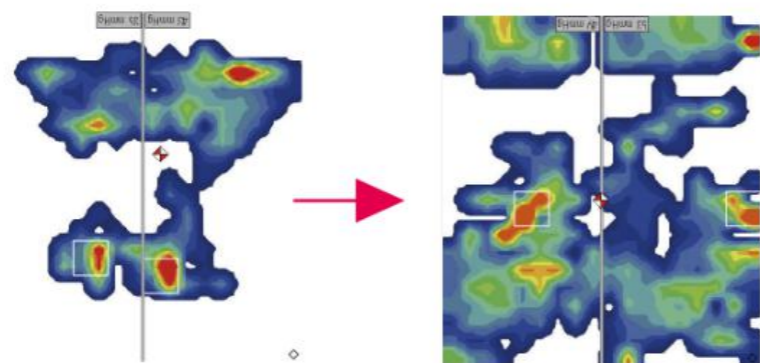

以前的产品

座王

※产品技术或配置变化，恕不另行通知，请以最新技术资料及检验结果为准。图片仅供参考，以实物为准。

适合长时间乘坐

可倾躺式为标配头部支撑



头部支撑高低、上下、左右位置可调节

自走型易操作，介护型不易疲劳



头部支撑的所有方向都可调节
可倾躺式轮椅头部、
颈部的支撑非常重要



介护



自走

① NA-475F

② NA-477F

标准样品



坐宽可通过
宽度 5cm 的
调节带进行
装拆调节



座王系列多有款
轮椅的扶手均为
上下可调节。
可以通过旋钮调
节高度。(该式
样非标配)

通过改善姿势、对应适当扶手
高度的变化



座王系列多有款
轮椅的座垫均为标准
配置。(该式样
非标配)

厚度: 5cm
重量: 1.0kg

	车轮 × 万向轮 (尺寸)	座宽 (可选 cm)	臀部有效宽度	座深 (可选 cm)	靠背高度 (cm)	可调式升降扶手 (cm)
① NA-475F ^{※1}	16 × 6	40 · 42 · 46		40	48	24 · 26 · 28 · 30
② NA-477F ^{※1}	20 × 6	40 · 42 · 46		40	48	24 · 26 · 28 · 30

	前座高 / 后座高 (cm) (调节时需要对应尺寸)	全长 () 折叠时	全高 () 折叠时	全宽 () 折叠时 (限座宽 40cm 式样)	重量 (kg) (不含座板)	承重 (kg) (含装载货物)
① NA-475F ^{※1}	40/40 ^{※2}	109 (103)	102 ~ 127 (66)	56 (33)	19.0	100
② NA-477F ^{※1}	40/40 · 42/42 · 44/44	103 (103)	102 ~ 134 (66 ~ 70)	62 (39)	20.5	100

※产品技术或配置变化，恕不另行通知，请以最新技术资料及检验结果为准。图片仅供参考，以实物为准。

从未有过的乘坐体验，笑脸源自于心情舒畅，优雅源自于舒适感。



自走用 NA-477F 防倾装置为可选项



介助用 NA-475F

NISSIN原创
3D 座面
可倾结构

小型介助
底面可倾

座王

介助用NA-475F
自走用NA-477F

靠背将立体的背部变为3D形状，贴合包裹支撑。此款轮椅为座面高度可调式，通过简单的背部松紧调节，即刻感受舒适体验。

可开合式扶手

可开合，可拆卸式脚踏



介助用 NA-475F




自走用 NA-477F

请委托有专业知识和技能的经销商操作座面高度调节。

介助用 NA-475F



展开尺寸：109 56 102~127
折叠尺寸：103 33 66

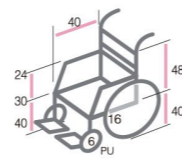


座宽为扶手套内侧尺寸，臀部有效空间为座宽（4cm）
重量包含座垫重量
扶手高，靠背高包含座垫厚度（5cm）

座面可调角度

自走用 NA-477F



展开尺寸：103 62 102~134
折叠尺寸：103 39 66~70

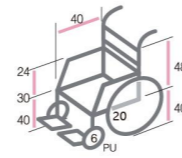

座宽为扶手套内侧尺寸，臀部有效空间为座宽（4cm）
重量包含座垫重量
扶手高，靠背高包含座垫厚度（5cm）

座面高度可调式

订购时，请指定座宽，靠背颜色

标准车架颜色



标准靠背颜色



简约、舒适、合身、构思、独特的靠背支撑



3D调整式靠背
靠背垫完美贴合背部形状，能够简便进行3D形状调整。通过透气性良好的网眼面料，体贴入微地支撑身体，不会偏移。




使肩膀、胸部、腹部得以放松，感到舒适。不是通过车架在支撑身体，而是通过3D形状的座背垫将身体完美贴合包裹，起到支撑作用。因此，背部、肩膀和胸部不会因为受到压迫而不舒畅，它能够使肩膀、胸部和腹部得以放松，保持舒适、稳定的姿势。

可调列举

骨盆中立姿势



骨盆后倾姿势（驼背的人等）

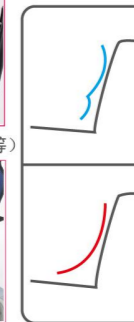

将臀围支撑带贴合腰部形状固定，用靠背撑起背部立体形状。

将臀部支撑带放下贴合，用靠背撑起背部的R形状。

各部详细



座面可以前倾，可以有效并舒适地进行用餐及工作。



座面后倾能有效调整施加于身体的压力等。NA-475F 可后倾至 30°，NA-477F 可后倾至 18°。



通过调节杆可调节考究的脚踏位置靠枕高度为梅花旋转调节式靠枕高度：65~90cm（含座垫厚度）
座面高度 40cm 的低车架设计



靠枕的头靠可通过附带的六角扳手向任意方向调节。



脚踏和座面的角度设定在 100°，比一般的轮椅小 10°。通过这个脚踏，大腿部位和骨盆部位更易稳定，能够保持自然坐姿。

※和本公司标准规格做的比较。



扶手高度可调式
包含座垫厚度 扶手高：24~30cm

通过恰当的扶手高度调节变化可改变坐姿。

※该式样非标配



NA-475F 的座面高度为 40cm，通过座面高度调节，NA-477F 也可以设定座面高度为 40cm，此座高便于伸进桌子。

座垫（标准装备）



后端延长为 R 形状，此形状可稳定支撑住座面里面，里面为柔软构造，可防止前滑。
厚：5cm
重量：1.0kg

防倾装置（可选项）



NA-475F 用插入式防倾装置，A 型左右一套



NA-477F 用高度可调式防倾装置 A 型左右一套
此防倾装置可对应座面高度调节。



靠背垫口袋为 A4 尺寸。



NA-431

坚固耐用
个性鲜明

快拆后轮
方便收纳

高灵活性
动感十足

轮椅参数

车架:7003铝合金
坐背:加厚网眼布+海绵
前轮:4寸PU
后轮:24寸快拆充气胎
展开尺寸:790*600*(770-870)
折叠尺寸:790*350*(770-870)

座宽:36/38/40/42cm
座深:38/40/42cm
前座高:44cm
后座高:39cm
载重:小于等于100kg
净重:11.3kg

NA-430

高灵活性运动款轮椅
狭小空间轻松旋转



SPORTY
&
ACTIVE
MODEL




NA-430标准式样

【参考重量】10.8kg(不含外座垫和防倾轮)

车身尺寸

- 轮椅座宽: 32. 34. 36. 38. 40. 42CM
- 轮椅座深: 36. 38. 40. 42CM
- 轮椅背垫高度: 30. 32. 34. 36. 38. 40CM
- 扶手高度: 28. 29. 30. 31. 32CM
- 前座高44CM
- 后座高39CM
- 轮椅总长82CM; 轮椅总高79CM; 轮椅总宽62CM; 轮椅折叠后宽度33CM(轮椅座宽40CM, 背垫高36CM时)
- 轮椅回转半径0.6M以内
- 车架表面处理17种颜色可选; 座背垫布料有6种颜色可选
- 车轮带3°倾斜; 扶手可向后打开; 可安装防倾倒装置
- 快拆式车轮(可选配碳纤维车轮)

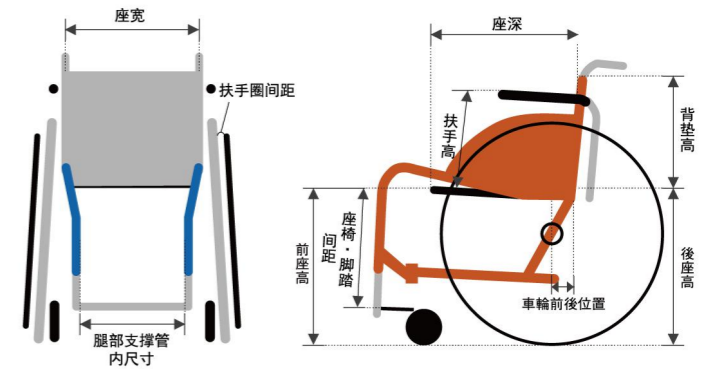

NA-432



快拆式后轮



可水洗空气纤维座垫



*标配版



*高配版

轮椅参数

车架:7003铝合金
坐背:加厚网眼布+空气纤维内芯
前轮:4寸PU
后轮:24寸快拆充气胎
展开尺寸:810*570*730
座宽:36/38/40cm


座深:38/40/42cm
前座高:44cm
后座高:39cm
载重:≤100kg
净重:10kg

车架颜色可选

金属灰 哑光黑 深红


Frame color

车架17种颜色可选, 彰显个性时尚!

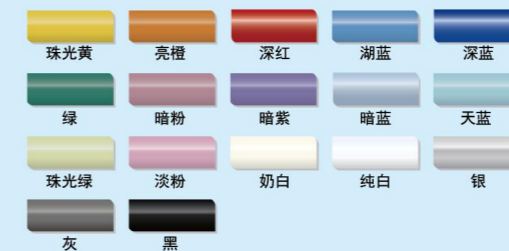

Back support color

背垫5种颜色可选。

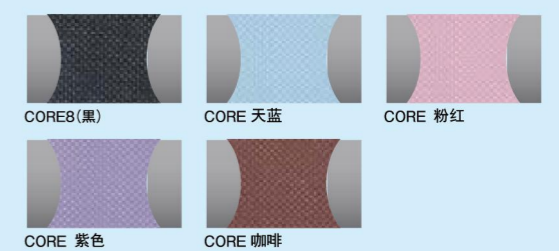

注入全新的设计理念,使强度、美感、灵活性进一步提升,全尺寸定制使轮椅与身体更好的结合



MS-III


- 标配碳纤维护裙板
- 24寸可拆式后轮
- 铝制轮毂前轮
- 轻量型采用φ22航钛铝合金主车架
- 净重仅约8.6kg,承重75kg
- 标准型采用φ25航钛铝合金主车架
- 净重仅约10.2kg,承重100kg

Back support

背部支撑



椅背

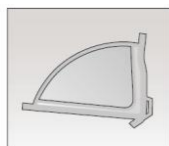

前面一半处可以调节轮带,靠背可以自由弯曲和支撑。

除了笔直的后背支撑管,也可以选择弯曲管

它切合骨盆的设计带给你宛如你身体一部分的舒适感。同时能够支撑起骨盆,帮助你长时间保持固定的姿势。

Side guard

侧护板

侧护板管道的外表面和后撑管道的外表面在同一直线上



Tire Panaracer

轮胎

24英寸(520*540)轮椅专用轮胎, PANARACER NEWTRON SPEC S/S2标准装备。



(25-520) SPEC S

颜色
■ 灰 ■ 蓝

Brake

刹车

POS刹车
PPS刹车

收纳式的制动刹车,选择的杠杆可以朝推拉的PPS刹车。POS刹车还装备了可以用onetouch辅助操作的加载弹簧式。



可选外框颜色

车架颜色

珠光黄	亮橙	深红	湖蓝	蓝	绿	墨绿	暗粉	暗紫
暗蓝	珠光蓝	珠光绿	淡粉	亮黄	白	亮白	银	灰
黑色								

PREMIUM COLOR 高级颜色

高级蓝色	高级红色	高级粉色
------	------	------

MAZIORA COLOR 幻彩金属色

麦哲伦	梯形四重星	安德洛米达	马特洪峰
麦肯利			

POWDER COATING 粉状涂层

标准颜色: 银色涂装

全新一代MS,继承前代优秀设计,增加了碳纤维护裙板,旋转式可拆卸脚踏。

MS-III
EVOLUTION

旋转式可拆卸脚踏



MS EVOLUTION 坚固 高性能 轻量

从低价到高价, 根据自己的需求来配置只属于自己的个性轮椅。



PHOTO/标准车架式样可选

车架: 红色
 轮毂: 24寸碳纤维
 外胎: 20-540
 万向轮: 运动减震前叉 / 4寸宽幅缓冲
 ※坐垫是参考品。

背部: 网眼布靠背
 护裙板: R形
 背角度调整·扶手管
 参考重量: 约12.3kg (包含坐垫)

车轮可选项

MS标准车架 /MS L车架

00175-000239

车体寸法


- 坐宽: 30 · 32 · 34 · 36 · 38 · 40cm
- 前座高: 41 · 42 · 43 · 44 · 45cm
- 后座高: 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41cm
- 车轴前后位置: 有7个位置可选

标准颜色: 银色涂装

【铝色涂装】




【涂装】

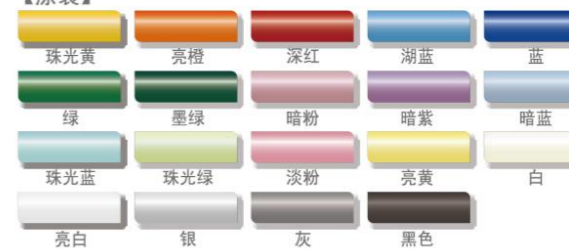

PREMIUM COLOR 高级颜色



MAZIORA COLOR 幻彩金属色

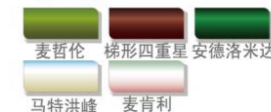

POWDER COATING 粉状涂层



MS-S



车体寸法

- 坐宽: 28 · 30 · 32 · 34 · 36cm
- 前座高: 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45cm
- 后座高: 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40cm
- 车轴前后位置: 有6个位置可选

标准颜色: 银色涂装

GENESIS



车身尺寸

座 宽: 32cm-46cm
 座 深: 34cm-40cm (STD)
 40cm-48cm (长车架)
 靠背高: 32cm-42cm
 前座高: 42cm-48cm
 后座高: 37cm-42cm
 外倾角度: 0° · 2° · 4°
 重 量: 10.8kg-13.0kg
 耐荷重: 120kg

车架颜色



高刚性车架



简洁的车轮部分



崭新的设计



Kids series

精灵系列

精灵之儿童轮椅

PIGLEO TILT III	35
PIGLEO II	37
PIGLEO TILT+	38
NA-428P	39
RED WOOD	40
LITTLE WOOD	42

倾斜&可躺式轻型婴儿车

PIGLEO TILT III

可以倾斜&靠躺的 PIGLEO 系列
可以实现舒适，消除紧张的坐姿，倾斜&可躺式婴儿车

PHOTO/
L 尺寸
【参考重量】16.5kg
可选项/遮阳套，开合扶手管，护裙板（中）



座面高度较高
地面灰尘等增多，座面变高可以远离地面灰尘及夏季从地面反射的强光。

通气性良好
座背垫网眼布料可以防止体表温度的上升及闷热。

缓冲性较好
前轮·后轮是乘坐舒适的橡胶不爆轮胎。



PHOTO/
M 尺寸式样
【参考重量】14.2kg
可选项/大容量多目的台面，护裙板（大）
大腿护板（小），头枕，遮阳套



4种尺寸
可选择



车架LL尺寸的头枕支撑管可拆卸


PHOTO/
车架 S 尺寸
【参考重量】12.3kg

PHOTO/
车架 LL 尺寸
【参考重量】16.1kg

PIGLEO TILT III

S	M
L	LL

载重 30kg (S-M) 载重 45kg (L) 载重 60kg (LL)

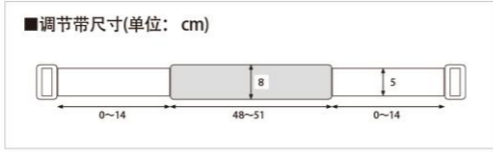

覆盖式背垫，座垫的颜色

	CORE蓝
	CORE粉

覆盖式背垫及外座垫可以洗涤。
※有关洗涤方法，请遵守使用说明书的注意事项。

具备出行便利的可选项

倾斜 & 靠躺时

折叠时紧凑小型

可选项/大容量多目的台面
护裙板(大)、大腿护板(小)、头枕、遮阳套

脚踏的角度可调节

※黄色的购物篮不包括在产品及其可选项中。


PIGLEO TILT III

活动时或身体想休息时，可以根据不同的状况，变换坐姿。

<p>倾斜角度</p> <p>边握刹把可以倾斜。</p>	<p>可躺操作</p> <p>滑动&锁紧背部管，就可靠躺。</p>	<p>脚踏角度可调节</p>	<p>脚踏板角度可调节</p>	<p>新型张力调整</p> <p>背上部是横调节带式样，下部是十字调节带+臀部调节带式样，座部是横调节带，从臀部、腰部固定，就可支撑整个身体。腰部的十字调节带也可起到控制身体横向错位的效果。</p>
-------------------------------------	--	-----------------------	------------------------	--

机型尺寸

项目	尺寸	S尺寸	M尺寸	L尺寸	LL尺寸
乘车对象年龄		1岁	5岁	11岁	13~16岁
对应乘车者身高		80~110cm	110~130cm	120~140cm	140~170cm
承重		30kg	30kg	45kg	60kg
座椅高度(水平时)		51cm	51cm	53cm	53cm
座椅宽度(座/背)		26cm/32cm	30cm/36cm	34cm/40cm	38cm/44cm
靠背高度		58cm	63cm	70cm	90cm(包括头部支撑)
座椅深度(调节式)		20~28cm	22~30cm	28~38cm	34~42cm
脚踏板到座面的距离(调节式)		13~28cm	22~34cm	23~35cm	30~37.5cm
高×宽×长 ^{※1}		115×62×89cm	114×62×94cm	123×67×104cm	142×67×114cm
扶手高度 ^{※1}		115cm	114cm	117cm	117cm
车轮		5" PU前轮, 8" PU后轮			
重量		12.3kg	12.7kg	15.1kg	16.1kg
折叠时 高×宽×长		95×45×62cm	95×45×62cm	103×45×67cm	101×45×67cm(包括头部支撑)
脚踏管与座垫之间的角度(调节式)		90~180°			
腿部铝管与脚踏板之间的角度(调节式)		90~180° ^{※2}			
最大倾斜角度		40°			
最大可躺角度		90~120°			

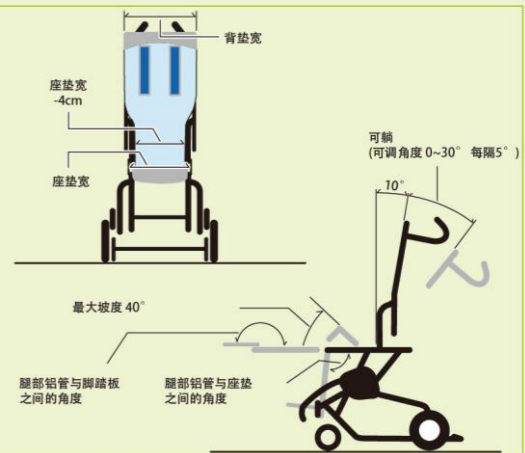

※1 座位是水平时，背部支撑是90°，座椅深度最小，脚踏管与座垫之间是90°。 ※2 因为大小的差别，腿部铝管与座垫之间的角度会改变。

可选项

以下是可以 PIGLEO TILT III 带来更舒适，更便捷的可选项配件。

<p>可以放置一般的购物篮</p>	<p>大容量多目的台面 台面的有效空间: 41cm X 24cm。 最大负载承重 8kg。 ※根据购物篮的尺寸，有可能不能放置。 照片里的购物篮不在产品中。</p>	<p>可开合扶手 扶手高度 24-16 cm，可以调节。角度可调节。 已有安装桌面柱子的螺丝孔。 ※无法与护裙板(大)同时安装。</p>	<p>① 护裙板(大) 2枚/组 可以防止手腕和身体不伸到婴儿车外面。</p>	<p>② 大腿板(小) 2枚/组 可以与开合扶手管同时安装。</p>	<p>③ 护裙板(中) 2枚/组 可以与开合扶手管同时安装。</p>
<p>跨部调节带 可以防止臀部向前偏倚。</p>	<p>Measuring method of hip heel strap (Unit:cm)</p>	<p>头枕: 灰色 安装在覆盖式背垫上，有效的支撑头部与颈部稳定。</p>	<p>弹性身体调节带 M/S 可以减少胸部的压迫，有效支撑身体。通过中间松紧带的伸缩，来对应乘车人员的动作。 ※照片是在PIGLEO TILT III S车架上装的弹性身体调节带 S尺寸。</p>	<p>桌面组 可以利用扶手管安装。 ※桌面的安装需要扶手管。 另外，请指定支撑部的安装位置。</p>	<p>桌面用的滑动棒+调节螺丝组 不需要购买桌面板的情况下，仅仅安装金属类。 ※桌面安装需要扶手管。</p>
<p>防雨罩: S, M尺寸用 / L, LL尺寸用 罩在 PIGLEO TILT III 上，可以防止小雨给乘坐者及车身的淋湿。拉链开合式。 ※无法防止大雨、强风。 ※下订单时请指定尺寸。</p>	<p>遮阳套 可以抑制由于长时间太阳直射带来的不良影响。有确认窗口，可以观察到乘坐人员的情况。</p>				

轻便紧凑保持坐姿的婴儿小推车

PIGLEO II

轻型、紧凑，可以轻松折叠的
婴儿小推车。

任何部位都很轻便紧凑，着实保持坐姿，
为了实现这些目标而设计的易操作的婴儿小推车。

座椅深度和脚踏高度可以根据
小朋友的成长进行调节。



PHOTO/M尺寸自选式样
座椅颜色：蓝色
胸部调节带是可选项



折叠时

PHOTO/S尺寸自选式样
座椅颜色：红色
胸部调节带是可选项

PIGLEO II

标准彩色座椅

SS尺寸	S尺寸
M尺寸	L尺寸

红色 蓝色 粉色 绿色

⚠️ 为了防止乘坐者的下落，使用时一定要安装座椅安全带。

规格尺寸

项目	尺寸	SS尺寸	S尺寸	M尺寸	L尺寸
乘车对象年龄		到1岁半	1岁半开始	5岁半开始	11~13岁
载重		20kg	30kg	30kg	45kg
座面高/座面角度		50cm(按座寸法基准点)/10°			
座椅宽度		约26.5cm	约30.5cm	约34.5cm	约38.5cm
靠背宽度		约28cm	约32cm	约36cm	约40cm
座椅深度(调节式)		18~22cm	20~24cm	22~30cm	28~38cm
背支撑高度		60cm		70cm	
背支撑角度(调节式)		90·95·100°			
脚踏板到座面的距离(调节式)		12~26.3cm		22~36.3cm	
车轮		前轮：5" PU 后轮：8" PU			
全长(折叠时)		86(35)cm		87(35)cm	
全宽(折叠时)		50(50)cm	54(54)cm	58(58)cm	62(62)cm
全高(折叠时)		108(100)cm			
重量		6.8kg	6.9kg	7.4kg	7.8kg



NISSIN新型背座椅系统 可以支撑臀部至躯体，防止身体向前、向侧倾倒。

座背垫透气性好 通气性出色的座背垫，可以防止体表温度的上升及闷热，保持舒适。

脚踏一体式刹车 后轮处安装有脚踏一体式刹车，可轻松刹车。



背部支撑角度可调节 不使用工具，可迅速的进行背角度调节，对应儿童各种状态的变化。

遮阳套 可以抑制由于长时间太阳直射带来的不良影响。有确认窗口，可以观察到乘坐人员的情况。

可变换体位，便于换衣服的轻量型可后倾折叠式推车

PIG是由希腊神话的皮格马利翁而来的父母的强烈的愿望。
LEO 是象征孩子像狮子一样有一颗坚强的心包含这两层意思，取名为 PIGLEO。

采用宽型靠背，
能将肩膀，手臂
很好收纳

PIGLEO TILT+ PLUS

靠背角度
+30° +60°
的换衣体位



小型折叠



后倾角度0-45°




折叠式，带放倾装置



护腿角度可调式



靠背、座垫粘扣可调式

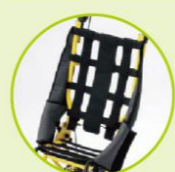

把手高度可调式



梅花旋扣可调式 L型通过设定，护腿和座垫间的角度可能会有限制。

S尺寸

M尺寸

L尺寸


标准车架色



型号	展开尺寸	折叠尺寸	承重	重量
S型	1110×480×920mm	740×480×600mm	30kg	10.9kg
M型	1130×510×920mm	760×510×600mm	30kg	11.3kg
L型	1320×550×990mm	850×540×660mm	45kg	16.6kg

PLGLEO TILT PLUS

规格参数 (后倾角度 0~45° 折叠时刻前倾至 -45°)

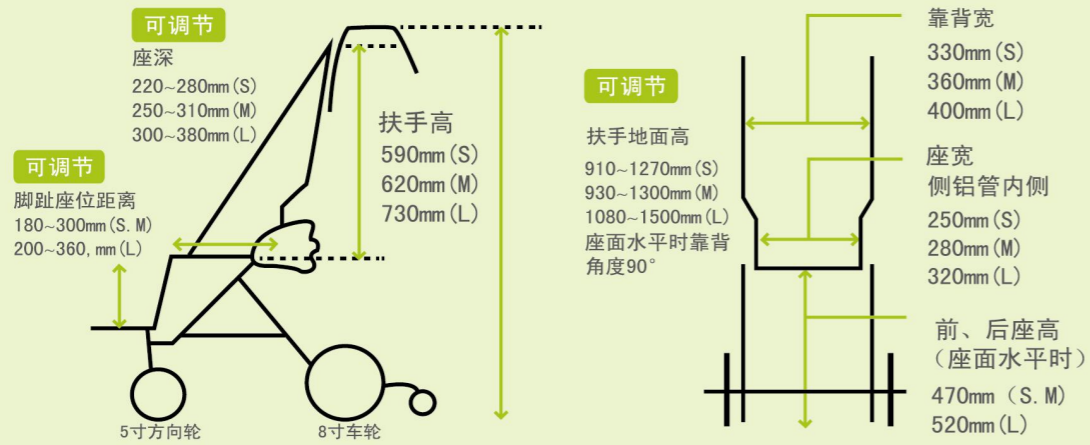

NA-428P

完善的装备令人喜悦, 此款车型能够激发儿童的挑战精神, 充满动感、使用更轻便。

为挑战精神助威

承重50kg L型车架——详细式样

车架颜色: 天蓝色
坐背垫颜色: CORE4
详细参数:
车架长: 45cm
座宽: 26. 28. 30. 32. 34. 36cm
座深: 24. 26. 28. 30. 32. 34. 36cm
前/后座高: 42/39. 42/40. 44/40. 44/41. 44/42cm
靠背高: 28. 30. 32. 34. 36. 38. 40cm
靠背角度: 90度
脚踏到座垫距离: 16. 18. 20. 22. 24. 26cm
把手高度: L型后座高+54cm
后轮规格: 22寸-24寸
参考重量: 10. 8kg

承重50kg M型车架——详细式样

车架颜色: 天蓝色
坐背垫颜色: CORE4
详细参数:
车架长: 42cm
座宽: 26. 28. 30. 32. 34. 36cm
座深: 24. 26. 28. 30. 32. 34. 36cm
前/后座高: 40/38. 42/40. 44/40cm
靠背高: 28. 30. 32. 34. 36. 38. 40cm
靠背角度: 90度
脚踏到座垫距离: 16. 18. 20. 22. 24. 26cm
把手高度: M型
后轮规格: 20寸-22寸
参考重量: 10. 8kg

承重50kg S型车架——详细式样

车架颜色: 天蓝色
坐背垫颜色: CORE4
详细参数:
车架长: 39cm
座宽: 26. 28. 30. 32. 34. 36cm
座深: 24. 26. 28. 30. 32. 34. 36cm
前/后座高: S型 36/34. 38/34. 38/36. 40/36cm
靠背高: 28. 30. 32. 34. 36. 38. 40cm
靠背角度: 90度
脚踏到座垫距离: 16. 18. 20. 22. 24. 26cm
把手高度: S型后座高+50cm
后轮规格: 18寸-20寸
参考重量: 10. 8kg



Kids model

儿童型

三角形倾斜结构保持座椅姿势。

通过尺寸调节部件交换适应各种环境

※各部的调节和部件交换请委托给菊友专业知识技术的贩卖商。

RedWood
TRIANGLE TILT For KIDS



PHOTO / 可选规格

椅宽: 32cm
参考总长度: 97cm (97cm)
(最大倾斜时参考总长度121cm)
参考总高度: 115cm (81cm) (除拉手)
参考总宽度: 52cm (41cm)
参考重量: 19. 8kg
外框颜色: 浅粉色

PHOTO / 可选规格

椅宽: 32cm
参考总长度: 86cm
(最大倾斜时参考总长度130cm)
参考总高度: 125cm (除拉手)
参考总宽度: 52cm
参考重量: 23. 0 kg (除座垫)
外框颜色: 浅蓝色



RedWood
TRIANGLE TILT For KIDS

倾斜角度:
-2~28°



可最大前倾至-2°。
可用于用餐和工作时需要前倾的场所。

RedWood 标准规格

- 椅宽 (扶手垫内侧间尺寸): 26 · 28 · 30 · 32cm
- 全座高 45 · 47cm
- 后座高 45 · 47cm
- 椅背高 48cm
- 头部靠垫 68cm
- 椅长 26 · 28 · 30 · 32 · 34cm
- 刹车 脚踏式
- 辅助刹车 拉手制动式

倾斜角度:
-2~28°



RedWood 斜靠背配件加算

斜靠背的支点、
可以选择由椅面+3厘米+8厘米两种。
※斜靠背功能以外的配件还需另加算。



折叠时

标准外框颜色



标准坐椅颜色



随座椅 (UR-8)

为了安心 便利 快捷 功能充实

NISSIN 原创 REAL MODULAR TRIANGLE TILT

座椅的安全性进一步提高。

NISSIN 原创 TRIANGLE TILT
安定性超群的三角形结构。倾斜时由三点支撑的摇摆和弯曲减少，可放心使用。

安装了座位保持装置的例子
※关于各种座椅保持装置的安装请与贩卖商商讨。

高度+角度可调整式扶手
脚踏式刹车
椅背可拉伸调整式

配件 扶手 扶手高20~26cm (可调整式)

标准配备 配件

可上调式扶手 可拆卸式扶手 可上调式+角度可变 角度可变式扶手

脚+腿部靠垫

标准可选择 配件

标准直下型 (踏板和座椅间距20~24厘米)
标准固定式※1
夹板式直下型 (腿部靠垫与座椅间距为16~19cm)
固定式宽脚部支架
开放式+可拆卸式※1

※1 标准固定式、固定式宽脚部支架、开放式、可拆卸式腿部靠垫与座椅间距可调节为25~29cm (短)和27~34cm (标准)两种。

头部靠垫 旋钮调节可拆卸式

标准可选择 配件

附辅助用拉手 枕头

其他配件

桌子 (前后滑行可拆卸式) ※照片中的是桌子 (小)。
车轮辐条侧面外表 KF-17 ※照片中的是透明款。
防跌倒装置 挡泥板 置物台 配有 littlewood 专用杆 杆长 约151cm

椅座骑行配备

座椅 (包含UR-8+中心线)
中心线部分采用透气性良好的振动加工。

中心线部分颜色 (座椅6色)

1. 绿色 2. 黄色 3. 红色 6. 蓝色 9. 浅褐色 10. 白色

外框颜色配件

珠光黄 鲜黄色 标准红色 基本蓝色 亮蓝珍珠色 蓝绿色 森林绿色 淡粉色 淡紫色
浅蓝色 浅绿色 亮黄色 奶白色 亮白色 金属银色 炮铜色 黑色 淡蓝色

PREMIUM COLOR 高级颜色

高级蓝色 高级红色 高级粉色

※有可能无法同时安装多个配件。
※为提升产品质量 如有不做预告而改变产品规格的情况 请谅解。
※详情请参阅订购说明书。



这是一款将生活方式和身体结合的量身定制车架，可以根据每个人不同的身体姿态，保持恰当的理想坐姿

Little wood

倾斜构造
倾斜角度: 0°-30°

调整构造
座背间角度: 90°-110° (5°螺距)



想你所想, 设计如你所愿

Modular Order System

根据你选择的类目, 指定的尺寸, 完成组装出货。



Lineup

上车架	 Sling款	专用车架, 根据倾斜机构, 可以后倾, 保持稳定姿势。	 Mould款	专用车架, 根据倾斜机构, 可以后倾, 保持稳定姿势。
下车架	 室内款	采用四轮带锁的万向轮, 可以原地转弯。	 室外款	车架使用前轮为5寸万向轮, 后轮为16寸, 方便机构和学校使用。
头部车架	 Sling款	对应此款的车架, 支撑部位的高度、前后位置、角度可以调节。	 Mould款	对应此款车架, 支撑部位高度、前后位置、角度都可以调节。
扶手	 角度调节开合款	可以实现扶手的角度调节、开合以及高度调节。	 开合款	标准款扶手开合, 高度可以调节。
脚踏	 L型	保持下腿部和足部、脚踏可以开合的状态。	 开合升降脚踏款	膝关节和脚关节受到活动限制的话, 可以调节到恰当的角度。

Option 可选项











松紧调整式
靠背垫套
(高透气·吸水速干)

头枕
(吸水速干)

胸部·骨盆调节带 防倾倒装置(插入式)

Color 车架

背垫套

							
灰	蓝	橙	红	绿	紫	黑	藏青

※产品技术或配置变化, 恕不另行通知, 谨以最新技术资料及检验结果为准。图片仅供参考, 以实物为准。

Sports series

动系列

动系列之运动轮椅

NA-411C	45
NA-411B	45
NA-412C	46
NA-412B	46
NA-414A	49
MS 射箭	49
NA-413B	50

篮球专用轮椅

NA-411B

各部尺寸均可调试的可调节型

NA-411C

坚硬且富有弹性 各部均可定制 打造只属于您的终极轮椅

NA-411B 可调式

PHOTO/可选样式

车架：亮白
车轮：25寸SPINERGY
辐条SPORT
外胎：20-559PANARACER NEWTRON SPEC R



NA-411C 固定式

PHOTO/可选样式

车架：钛灰色
车轮：26寸SPINERGY
辐条SPORT
外胎：25-590PANARACER NEWTRON SPEC R
※坐垫是参考品。



NA-411C 固定式

●车轮角度 14° · 16° · 18° · 20°



NA-411C 固定式

PHOTO/可选样式

车架：特别设计 粉状涂层
车轮：26寸SPINERGY辐条SPORT
外胎：20-590PANARACER NEWTRON SPEC R



NA-411C 固定式

KAMI 模式 PHOTO/可选样式

车架：亮粉黑
车轮：27寸 SPINERGY
外胎：PANARACER (参考品)
无护裙板式样



NA-411B

車軸外露尺寸、座高、脚踏板角度可调节

●车轮角度 14° · 16° · 18° · 20°

应对激烈比赛（操作）的标准装备

靠背·坐垫

靠背坐垫可以通过粘扣调整张力



座面高度可调节
(NA-411B)

NA-411C 固定式



固定保险杆
也可以选择轻量固定式的



保险杆&脚踏板
采用可拆卸款式
脚踏板也可以上下调整



脚踏板角度可调整
(NA-411B)

可选项



护腿保护套

※NA-411B是标准装备



铝制护裙板



辐条保护套



推把保护套

根据长度定做
(直径5.5cm 长度65cm)
※NSB-07标准装备



NEUTRON spec R III
20-540/20-559/20-590
PANARACER NEWTRON
SPEC R3

耐磨性好，运动型专用
●颜色：红·米。



M2 可调式安全带

安全带包含一根棘轮衬垫调节带，
可通过开关实现微调，舒适、安全。

车轮可选项



黑



浅蓝



黄

24-25-26英寸 SPORT 2006

车架颜色可选项



网球轮椅

量身定做

NA-412C

NA-412B

在激烈的运动中要求瞬间的接球反应。球场路面的状况准确地传达到使用者手中。固定式 (NA-412C) 与可调式 (NA-412B) 两款式样皆是非常适合使用者的理想车型。



NA-412B 可调式

PHOTO/可选样式

车架: 黑色

车轮: 26英寸 SPINERGY SPOX SPORT

轮胎: 20-590 PANARACER NEUTRON SPECR R

※垫子可选

●车轮外倾角度: 14 • 16 • 18 • 20°

NA-412C 固定型

PHOTO/可选样式

车架: 哑光黑

车轮: 25英寸 SPINERGY SPOX SPORT

轮胎: 20-559 PANARACER NEUTRON SPECR

※垫子可选

●车轮外倾角度: 14 • 16 • 18 • 20°

车架颜色



可选项



腿部铝管套

24 • 25 • 26英寸



护裙板 (铝)

700c SPINERGY SPOX SPORT 2006



辐条挡板



黑



浅蓝



黄


NA-412B 各部详细说明



脚踏角度可以调节



座面高可以调节

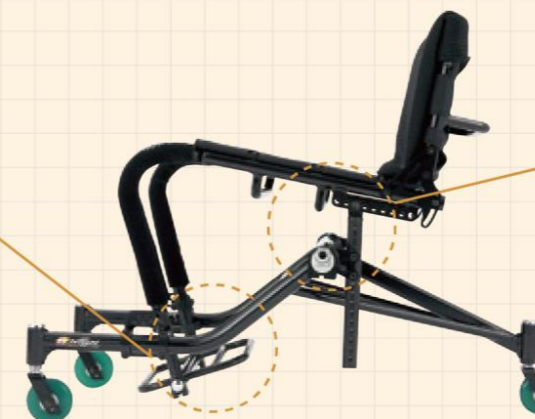

前座高 后座高 靠背角度 车轮前移尺寸
脚踏板角度 可以调节

NA-414A

在2006年冬季都灵奥运会淘汰赛中，包括高山滑雪女子坐式速降比赛中的金牌，获得高山滑雪比赛5块奖牌的2种机型。将滑雪者的精神力量，集中力量准确地转变为速度。独特的连杆机构和缓冲器的平衡可以将其变成可能。



滑雪车 长野型

PHOTO / 可选样式

稳定的滑行可以支持广泛的滑雪者，是款标准机型
车架颜色：阳极金



滑雪车 都灵型

PHOTO / 可选样式

是款实现了敏锐的转弯和滑行的高技能滑雪椅。
车架颜色：阳极（参考色）
※防倒雪杖是参考品
2006冬季都灵
森井大輝選手获得银牌
(高山滑雪男子坐式速降比赛)

Chair Ski 都灵机型

固定装置·滑雪板 另售

Chair Ski 长野机型

固定装置·滑雪板 另售

※详细请咨询销售代理商
※实物和照片有出入 请您谅解

标准框架颜色



铝银色

车架颜色可选项

铝色上色（八种）



铝红色 铝紫色 铝蓝色 铝青色 铝金色 铝黑色 铝粉色 铝茶色

可选项



防倒雪杖
(2个1套)

射箭轮椅 MS

各部详情



田径轮椅 NA-413B



田径轮椅 胜利装备


对胜利的无限追求，不断地探索。免去多余的部分，用简易的车架实现轻量化，减少空气阻力，平滑行驶也可以。

NA-413B

PHOTO / T型车架

车架：珠光红
车轮：前轮 20英寸碳纤维圈
后轮 27英寸碳纤维圈
参考重量：约8.2kg
(包含前后圆盘轮) (CORIMA) (ZIPP)

车架颜色

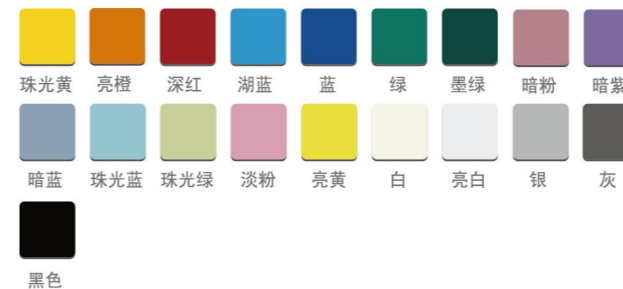


颜色可选项

PREMIUM COLOR 高级颜色



MAZIORA COLOR 幻彩金属色

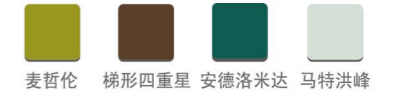

POWDER COATING 粉状涂层



各种详细说明

比赛用的车轮



铝制护膝车架



确保能将力集中到一起，传输到路面的刚性，也可实现轻量化



后轮



前轮

27英寸铝圈
27英寸碳纤维 4根 辐条 (CORIMA)
27英寸碳制盘式车轮 (CORIMA)
27英寸碳制盘式车轮 (ZIPP)

20英寸铝圈
20英寸碳纤维圈 (CORIMA)

扶手圈

铝管径 φ 10 (mm) 铝圈径 370 · 380 · 390 · 400 (mm)
铝管径 φ 12 (mm) 铝圈径 370 · 380 · 390 · 400 (mm)
铝管径 φ 14 (mm) 铝圈径 370 · 380 · 390 · 400 (mm)

电动轮椅

DYN36C-LY-ZJ	53
DYN18A-LW-ZJ	54
DYN36A-LY-ZJ	54
DYN30A-LY-ZJ	55
DYN20A-LW-ZJ	56
NA-431C	57
NA-431I	58
NA-431L	58
NA-431H	59



经济实用型电动轮椅车

X架经典结构设计

大容量锂电池

续航25KM

大功率电机

智能电磁刹车

高强度铝合金车架



DYN36C-LY-ZJ有刷款参数

展开长*宽*高	1100×650×910(mm)	载重	100KG
折叠长*宽*高	700*380*700(mm)	爬坡能力X	3°≤X°≤12°
座宽	470mm	前轮	175mm(7")
座深	420mm	后轮	320mm(12.5")
前座高	460mm(不含外垫)	扶手高度	240\260\280mm
电池	24V15.6Ah(锂电)	控制器最大电流	50A
续航	25KM	制动距离	≤1000mm
靠背高	380mm	最小转弯半径	900mm
净重	26KG	电机功率	360W
速度	≤4.5km/h		

DYN18A-LW-ZJ

轻量便携式电动轮椅车

透气纤维坐垫

优质锂电
一键拆装

电磁刹车
主动驻地



展开长*宽*高	930*540*885(mm)	载重	100KG
折叠长*宽*高	400*540*640(mm)	爬坡能力X	3°≤X°≤12°
座宽	450mm	前轮	175mm(7")
座深	420mm	后轮	320mm(12.5")
前座高	460mm(不含外垫)	扶手高度	250mm
电池	24V10.4Ah(锂电)	控制器最大电流	50A
续航	15KM	制动距离	≤1000mm
靠背高	380mm	最小转弯半径	800mm
净重	22KG	电机功率	360W
速度	≤4.5km/h		

DYN36A-LY-ZJ

可拖行电动轮椅车

折叠后
站立设计

透气纤维
坐垫

双充电
模式

电磁刹车
主动驻地



展开长*宽*高	910*640*920(mm)	载重	100KG
折叠长*宽*高	410*640*830(mm)	爬坡能力X	3°≤X°≤12°
座宽	440mm	前轮	7"
座深	420mm	后轮	12.5"
前座高	460mm(不含外垫)	扶手高度	235\255\275(mm)
电池	24V10.4Ah(锂电)	控制器最大电流	50A
续航	15KM	制动距离	≤1000mm
靠背高	400mm	最小转弯半径	720mm
净重	20.5KG(不含电池(电池1.8KG))	电机功率	360W
速度	≤4.5km/h		



DYN30A-LY-ZJ

轻量便携式电动轮椅车

整车仅
单人轻松提起
16.5 kg

无刷电机
电磁刹车

可脱卸锂电
拆装方便

双充电模式
轻松充电



展开长*宽*高	790*565*910(mm)	载重	100KG
折叠长*宽*高	400*565*645(mm)	爬坡能力X	3°≤X°≤12°
座宽	460mm	前轮	5"
座深	400mm	后轮	8.5"
前座高	480mm(不含外垫)	扶手高度	280(mm)
电池	24V10.4Ah(锂电)	控制器最大电流	50A
续航	15KM	制动距离	≤1000mm
靠背高	400mm	最小转弯半径	700mm
净重	16.5KG 不含电池(电池1.8KG)	电机功率	300W
速度	≤4.5km/h		

DYN20A-LW-ZJ

轻量便携式电动轮椅车

载重
150kg

快拆
锂电

双充电
模式

无刷
电机



展开长*宽*高	800*635*930(mm)	载重	150KG
折叠长*宽*高	635*480*690(mm)	爬坡能力X	3°≤X°≤12°
座宽	460/500(mm)	前轮	7"
座深	420mm	后轮	8.5"
前座高	490mm(不含外垫)	扶手高度	300(mm)
电池	24V10.4Ah(锂电)	控制器最大电流	50A
续航	15KM	制动距离	≤1000mm
靠背高	420mm	最小转弯半径	900mm
净重	19.5KG 不含电池(电池1.8KG)	电机功率	300W
速度	≤4.5km/h		

电动站立式轮椅 NA-431C

将站立结构电动化，
使下肢有障碍的人能轻松地站起。
驱动部采用简易的电动组合式，
电动与手动行驶均可。



站立时



车架颜色: 蓝色

电动站立式轮椅

承重 80kg

适合身高 160cm~175cm
规格说明
尺寸(L*W*H): 100cm*65cm*84~135cm
座宽: 38cm (inner side)
座深: 38cm
前座高: 42cm
后座高: 38cm
腿部支撑高: 43cm
扶手高: 33cm
万向轮: 5 in
后轮: 24in. *1 3/8
重量: 38.8kg (包含电池)
材质: 铝
座垫厚: 8cm
胸部安全带: 松紧可调节
膝盖安全带: 附垫
(座垫事先为宽松状态, 使用时请使用座垫。)

⚠ 根据使用环境和操作能力, 请咨询您的客户经理是否需要安装

⚠ 当站立的时候, 不要向前移动。

座背垫颜色



NM-8

车架可选颜色



红 蓝 黑

功能说明

依靠电动站立结构, 可轻松站立。



PHOTO/ 站立状态
车架颜色: 蓝色
参考尺寸(L*H*W): 100cm*81~127cm*63cm
参考重量: 23.6kg

部件描述



膝盖安全带

当使用者站立时, 腿部支撑可以给使用者可靠和柔软的保护感。

操纵杆

通过操作手柄使用者可移动或站立, 购买时请指定安装位置。

扶手可后掀

扶手可后掀, 方便移动使用者。

操作部分为前后调整式

操作部分可前后滑动, 可以对操作位置进行微调。


NA-431I (IS电动)

驱动性能、承载力全都超一流!

NA-431I 可选样式

驱动轮: 电动单元 雅马哈JWX-1
参考重量: 约27.2kg (不含坐垫、电池)

车架颜色

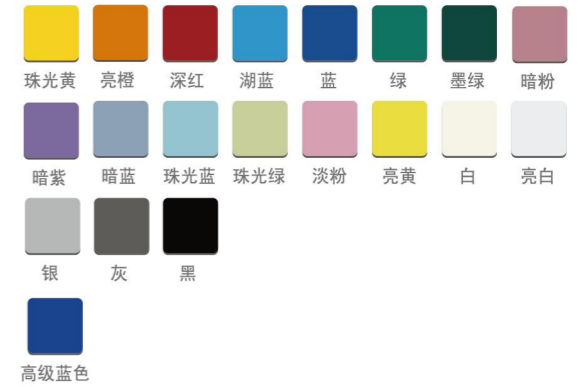

高级蓝色

助力电动NA-431L



规格项目表

规格内容	电机部分 NA-451B	
	A、B型	C型
驱动方式	后轮直接驱动	
操纵方式	左右手动轮圈操纵	单手手动轮圈的单脚操纵
制动方式	制动力援助+手动车椅制动	
驱动车轮直径	22 * 24英寸	仅22英寸
车轮安装方式	装卸式 / 固定式	固定式
手动/电动切换	手动开关切换方式	
电机	30分钟额定输出 24V 90W x 2	
协助制动	辅助者用式样 侧面刹车杆式	
蓄电池 (平均一个)	镍氢 (JW专用) 24V x 6.7Ah 重量2.9kg	
充电器	电源	AC100V ~ 240V 50/60Hz
	充电方式	完全自动充电方式
充电时间	约2 ~ 3小时 (常温情况下)	
持续航行距离	15km以上/1充电 (A*B型)	
补助速度范围	前后进6km/h未滿	前后进4km/h未滿
	元件重量	
	15.9 kg (包括蓄电池)	17.2kg (包括蓄电池 辅助制动)

A型 (手动轮圈模板)

够握住手动轮圈的人 (例如: 脊椎损伤)

B型 (手动轮圈图层)

不能握住手动轮圈的人 (例如: 脑髓损伤)

C型 两手不能操作车椅的人 (例如: 局部麻痹)

※A*B型号发售时只有镍氢电池。

NA-431H Patrafour®

优秀的行驶性和地面适应性, 面对路况不好的路段和高低不平坡道等也可安心地轻松行驶。生活范围将更加轻松地扩大。



PHOTO / 可选规格
机体颜色: 金属银色


PHOTO / 可选规格
机体颜色: 金属酒红色



Patrafour

●开发·制造 关东自动车工业股份有限公司 00175-000183

各部分尺寸 单位 (cm)

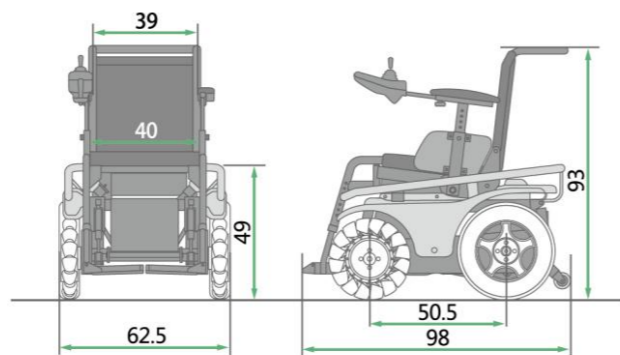

Patrafour.

各种详细说明



行驶控制器

用于Patrafour专用开发的
设计良好, 操作性强的
遥控器。



踏板安全带

适于需要固定脚部的人。

配件 (新车购买时加额计算)



运送管

辅助人提起Patrafour时需要。
安装自行车用零件类运送管 请购
买25毫米用。(由于安装市场上贩
卖的配件而造成的故障和事故,
不在我公司保证对象以内。请您
谅解)



【市场出售的零件 安装实例】



护裙板

可防止衣服等下垂。

规格明细表

项目	仕様内容
尺寸 (总长度×总宽度×总高度)	98×62.5×93cm
重量	100kg (包含电池重量30kg)
前轮	WESN结构 直径: 30cm
后轮 (充气轮胎)	3.00-8-4PR (直径35cm) 气压: 294~314kpa
外框结构和尺寸	扶手 脚踏板 腿部靠垫 可拆卸式 座宽 40cm 座长40cm 座背高45cm (包含座垫厚5cm) / 前座高49cm (包含座垫厚5cm) / 后座高45cm (不包含座垫)
扶手高	5段可调节时20~30cm (包含座垫厚5cm)
椅背角度	5段可调节式结构 (90~110°)
驱动方式	4轮驱动
制动方式	通过电机发电和电磁刹车制动
操纵方式	通过手柄遥控器的全方向电子式操作方式
驱动马达	30分额定功率DC24V 280W×2
电池	LC·XC1238AJN型铅酸电池
充电器	电子定时自动充电方式 (车载式) (充电时间: 8~12小时)
速度	约3.0 约4.5 约6.0千米/小时 (最高6.0千米/小时) 切换式
连续行驶距离	30千米 测定条件: 常温乘车人体重75千克 以最高速度 在平坦道路行驶
实用登坡道角度	10°
越过路段的高度差	8cm
可越过沟的宽度	10cm
最小转弯半径	79cm 测定条件: 脚踏板的最外侧轨迹
使用者最大体重	100kg以下 (包含载物重量)

可选标准颜色



金属银色



柠檬绿色

配件颜色



金属蓝色



亮黄色



金属酒红色

※为提升产品品质 如有不做预告而改变产
品规格的情况 请谅解。

WESN构造的前轮 4WD皮带 实现了轻快的行驶和地面适应性。

●Point 1

4WD实现的超群的机动性



坡度陡的坡道也可放心行驶。
能行驶坡道最大倾斜度为10°
(铺设过的路)



高低不平的路段也可轻松驶过。
最大可越过80毫米段位差的路段
(前进时)



在倾斜路段行驶安稳 控制性高



在沙滩和雪地可发挥其威力
4WD的地面适应性超群。

⚠在沙滩和雪地行驶时, 有可能无法脱离路段, 请一定让辅助者通行。

●Point 2

4WD系统的特征和机体性能



●WESN构造的前轮

当轮椅拐弯时 所有车轮的方向与车轴不会变化的特殊构造。前进后退时也可像平时一样
车轮纵向旋转。转换方向时接地部分将横向
旋转

(已申请专利)

●皮带式4WD

为了不让车轮的车轴方向变化 可使后轮的驱
动力通过皮带传向前轮。通过简单的结构实现
高性能。

●令人吃惊的小角度转弯

通过WESN结构的前轮和皮带式4WD 可实现小
角度转弯 (原地转弯) 可轻松在狭窄的地方
移动。

高科技康养产品

HIGH TECH HEALTH CARE PRODUCTS

■ 呼吸类 ————— 62

- 便携式吸氧机
- 水素仪
- 负离子发生器

■ 纳米温疗设备 — 67

便携式吸氧机

1L



正常工作环境

环境温度范围: 5°C-40°C
相对湿度范围: ≤80%
大气压力: 50kPa~106kPa
输入电源: DC 16-19V, 1A

Note: 当贮运温度低于5°C时, 使用前, 应将设备在正常工作温度环境中放置2小时以上。

Note:

吸氧机工作时, 会周期性出现轻微的“噗嗤”声, 此为正常换气现象, 即右表中峰值噪声描述的值。

性能参数

外形尺寸	227x178x70	重量	1.5kg
氧气流量	≥0.5 L/min	氧气浓度	40-50%
稳定噪声	<36dB(A)	峰值噪声	<42dB(A)
额定电压	DC 16 V	额定功率	16-19 W

分子氢 具有预防保健 或防治效果



国际权威机构SGS检测认证


MINTECH原装进口水素仪

一分钟可产生100cc纯度99.99%以上浓度的氢气




人类百病之源——自由基

毒性自由基、恶性活性氧对人体产生的氧化损伤，几乎是人类的百病之源。氢也是宇宙中最小的元素，具有扩散性和渗透性强的特点，氢分子与毒性自由基和恶性活性氧结合可还原成水，从而快速清除人体有害自由基和氧化物，缓解和治愈各类疾病。

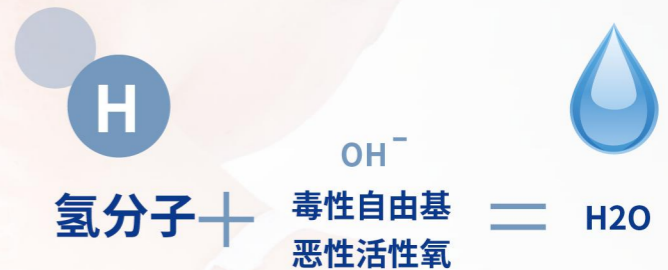

产品相关资质

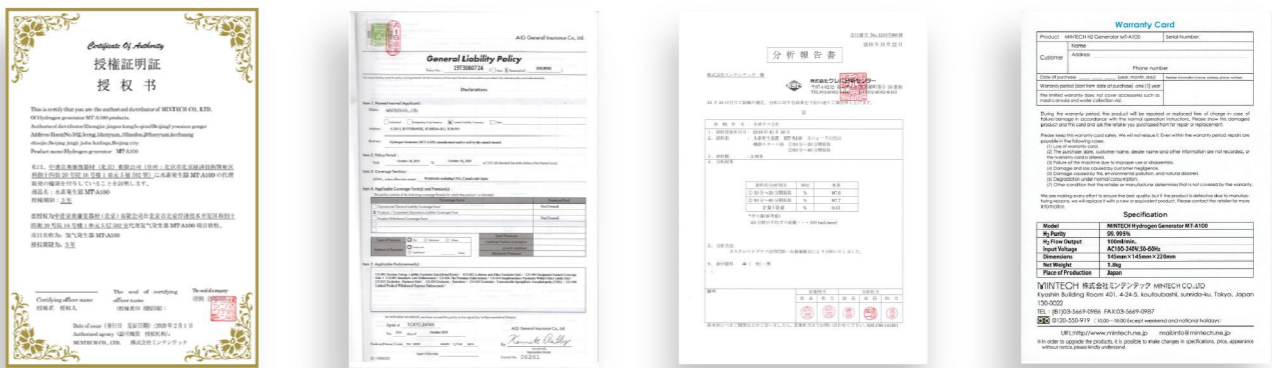

产品参数

品牌:	MINTECH	型号:	MT-A100
额定电压:	220V	主机尺寸:	145MM×145MM×220MM
额定频率:	50-60HZ	出氢量:	100ml/min
额定功率:	60W	氢气浓度:	99.995%
主机重量:	1.8KG	产地:	日本





O-RELA 负离子发生器

每一口呼吸2000万负离子
灭活病毒 杀灭细菌



从源头清洁您身边的空气

Comfortable life to you

O-RELA独有的 “マエダ山形方式”负离子发生技术



- 自然界的负离子即生即灭,无法传递到远处,而O-RELA 由于其独特的产生方式,负离子的存活时间长达 **60-90 秒**。
- 距离机器 **5 米之外** 仍可测出高达 **85000个** 浓度的负离子。
- 一台O-RELA的有效空间 **100平米**,可以对空间进行无死角的病毒灭活与抑菌。

相关资质




参数型号

■ 产品外观		
型号	208	209 N
电源	AC100~240V (50/60Hz)	AC100~240V (50/60Hz) • DC 5V (USB)
功率	7W	5W
重量	4.7kg	1.0kg
尺寸 (长×高×宽)	310×450×210mm	230×60×130mm
放电方式	コロナ無声放电 (マエダ山形方式)	コロナ無声放电 (マエダ山形方式)
负离子浓度	2000万/cm ³	1000万/cm ³
臭氧浓度	< 0.1PPm WHO基準値内	< 0.1PPm WHO基準値内
适用场所	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">学校</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">养老院</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">医院</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">家庭</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">公司</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">餐厅</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">健身房</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">商场</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">其它公共场所</div> </div>	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">车辆</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">书房</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">寝室</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">酒店</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">洗手间</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">救护车</div> </div>
档位	强弱两档+睡眠模式	强弱两档+睡眠模式
适用面积	100m ²	50m ²

纳米温疗—— 颠覆常规入浴方式

改变常规入浴方式 带来前所未有的入浴体验

1. 38-42°C的温和体感温度，创造适合儿童至高龄老人全年龄段的轻松洗浴环境。
2. 摆脱常规洗浴的压迫感，避免洗浴过程中脉搏及血压的升高，避免老人及体弱者的洗浴事故。
3. 较常规泡澡、淋浴更具有深层清洗、显著的温疗效果。
4. 促进人体“热激蛋白”的合成，提高免疫抗病能力，抑制肿瘤细胞的产生。
5. 有效促进新陈代谢，燃烧脂肪，降低体脂含量，增加机体活力。
6. 深层清洁，预防“青春痘”“头皮毛囊炎”“老年皮肤瘙痒”等皮肤炎症。
7. 清除毛孔皮脂氧化污垢，消除不快体味的发生。

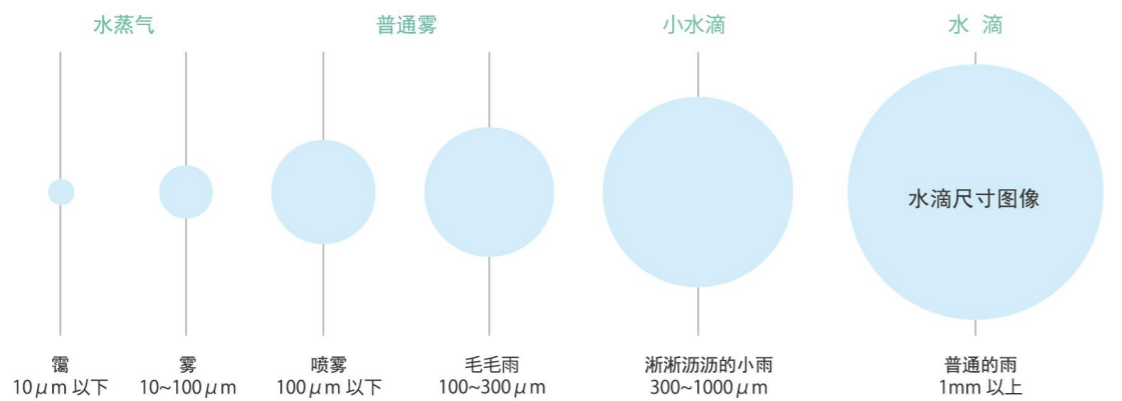

纳米温疗洗浴是什么？

纳米温疗洗浴是新型的不需要浸入浴盆的洗浴方式。保持 38 ~ 42°C 的温度，无桑拿浴房的窒息感。不适合桑拿浴的体弱者及老年人也能够放松身心愉悦地进行温疗洗浴。纳米温疗洗浴具有卓越的保温效果，入浴后的加湿效果给予角质层足够的水分，减轻由于干燥带来的皮肤瘙痒，纳米水粒子及负氧离子深入全身皮肤毛孔，通过提高身体内外温度，促进人体“热激蛋白”的合成，在洗浴的同时，活化细胞，提高身体免疫功能。

纳米助浴&纳米疗浴

厢式温疗舱

*适用于养老院、医院、社区助浴服务、康复医院



床式温疗舱

*适用于养生会所、针对术后康复的诊所、生活慢性病治疗



收纳轻松



简易操作



介护产品

增强免疫力

促进人体合成HSP，消除身体炎症



组装简单, 无需施工

完全不需要配电和排水施工就可以完成安装



突破常规入浴方式

一瓶纯净水就可洗浴，纳米水粒子深层滋润清洁



纳米温疗促进人体合成HSP,提高人体基础体温

HSP的黑科技功效

美肌活肤、深层保湿,清除自由基,加速新陈代谢,提高免疫细胞活力,抗衰老...



各种压力,肌肉疲劳导致
蛋白质受到损伤

体温上升 HSP增加

HSP 开始修复蛋白质



贝壳式温疗舱

*适用于美容院、月子会所

纳米温疗洗发

- 无需洗发水,科技洗发更洁净
- 清水洗头,深度控油
- 改善头皮健康环境
- 负离子促进血液循环,滋润养发
- 促进头皮细胞新城代谢

*方便卧床、术后等行动不便人群洗发



黑科技头疗仪

深层清理毛囊中的垃圾



无需洗发水
就能把发根的污渍洗净。



时间超短
仅需要1-2分钟



超级节水
深层清洗仅需要1L水



使用简单
使用和收纳都很简单

纳米温疗系列产品以及配置



贝壳式 (SHELL) NANO MIST BATH

尺寸	W870×H1520×D690
重量	约 110kg (不含粉碎装置)
功率	1200w
电压	220V 50Hz
粉碎装置	内置



厢式 (CABIN S) NANO MIST BATH

尺寸	W756×H1726×D920
重量	27kg (不含粉碎装置)
功率	600~1200W
电压	220V 50Hz
粉碎装置	外置



洗头仪 (HEAD SPA) NANO MIST BATH

尺寸	W370×D250×H500
重量	20kg
功率	600w
电压	220V 50Hz
用水量	0.8~1.5ℓ/min
给水箱	3ℓ

床式 (BED) NANO MIST BATH

尺寸	W830 × D2420 × H1470 (展开时) W830 × D735 × H1470 (收纳、移动时)
重量	80kg (不含粉碎装置)
使用电压	220V 50Hz
功率	650~1250W
粉碎装置	内置



厢式 (CABIN) NANO MIST BATH

尺寸	W820×D1130×H1520
重量	27kg (不含粉碎装置)
使用电压	220V50Hz
功率	650~1250W
粉碎装置	外置



便携两用式 (2 way) NANO MIST BATH

尺寸	W800×D1100×H1500
重量	18kg (不含粉碎装置)
使用电压	220V 50Hz
功率	650~1250W
粉碎装置	外置



足浴机 (Foot spa) NANO MIST BATH

尺寸	W1865×D960×H740
重量	120kg
使用电压	220V 50Hz
功率	650~1250W
粉碎装置	内置



* 推荐环境温度：室内20~30℃

* 在20℃以下的环境使用时，纳米水粒子浴房的温度想要达到适用温度可能需要的时间稍长。